



Travel Scoot® Hook-On

Instrucciones para el montaje inicial



1. Coloque las dos cintas adhesivas de velcro (vellón) se colocan en forma de anillo en la parte vertical del soporte en U, justo debajo del radio, de manera que las costuras estén orientada hacia el interior.

2. Marque el centro de todas las pilas con una cinta estrecha o un marcador.




3. Retire el asiento del perno en U y déle la vuelta. Primero deslice el espaciador de asiento de 3 cm en el tubo de asiento, luego deslice el enganche la placa con los ganchos planos hacia el asiento y finalmente el espaciador de 2 cm. Fije los espaciadores y la placa con un poco de pegamento o cinta adhesiva para que no caigan al suelo durante el desmontaje del asiento.

4. Las nuevas cestas plegables tienen un boche en el borde superior para mantenerlas unidas cuando se pliegan. Este broche obstruye el enganche y, por lo tanto, debe montarse en el lado opuesto o eliminarse por completo.



Montaje: Dispositivo de enganche para dos -Cestas plegables y una segunda batería

1. Coloque una pila con el cable de la pila apuntando hacia la izquierda en el soporte y empuje los dos perfiles H sobre ella dentro de la marca. Los ganchos metálicos más largos deben apuntar hacia delante.

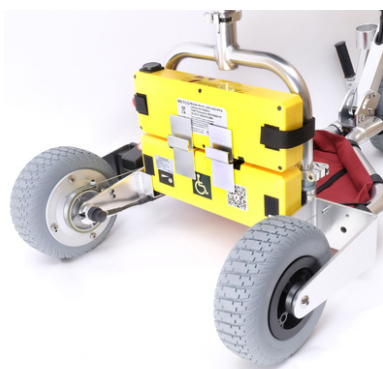

2. Coloque la segunda batería en los perfiles H y alinéela con la batería inferior. El cable de la batería debe estar en la parte inferior izquierda. De este modo, no es necesario reordenar las dos baterías cuando se trasladan. Fije la batería superior al soporte en U con las dos correas de velcro (ganchos).

3. Abra las cestas y presione brevemente la superficie inferior. La sección del hueco (flecha) es la superficie de apoyo de los ganchos de chapa inferiores.



4. Monte el asiento en el soporte en U. Cuelgue una cesta en los ganchos metálicos superior e inferior al mismo tiempo y haga lo mismo con la segunda cesta.